

# Introducción a la aplicación OneTouch Reveal®



La aplicación OneTouch Reveal® cambia la forma en la que usted ve la glucosa en la sangre

- Sincroniza los datos de forma ininterrumpida y directa entre su **medidor OneTouch Verio Flex®** y su teléfono inteligente.
- Crea una línea de tiempo de las actividades y los eventos importantes de glucosa en la sangre.
- **La tecnología ColorSure®** transforma los datos en rápidas instantáneas visuales que conectan su nivel de glucosa en la sangre con los alimentos, la insulina y la actividad.
- Lo ayuda a ver y compartir el progreso con su familia, amigos o su red de cuidado de confianza.



Línea de tiempo de eventos importantes



Libro de registro visual



Vea y comparta informes de progreso

# Comencemos...


## 1. Descargue la aplicación OneTouch Reveal® GRATUITA

- Visite la tienda de aplicaciones en su dispositivo móvil, busque "OneTouch Reveal" y, luego, instale la aplicación.



## 2. Active Bluetooth® en su medidor OneTouch Verio Flex®

- Presione el botón para encender su medidor.
- Presione los botones y al mismo tiempo para activar la función de Bluetooth®.

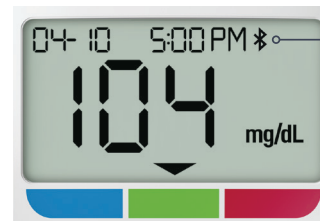

Bluetooth®

No se olvide de activar también el Bluetooth® en su dispositivo móvil.

## 3. Conecte

- Abra la aplicación OneTouch Reveal® en su dispositivo móvil y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- Cuando se lo indiquen, ingrese el número de identificación personal (PIN) que se muestra en la pantalla de su medidor en su dispositivo móvil y presione **Emparejar**.

12 3456

Ejemplo de un número de PIN



También puede ver su cuenta desde su computadora visitando [OneTouchReveal.com](http://OneTouchReveal.com)

¡Ahora está listo para realizar una prueba y sincronizar!

Descubra más en [OneTouch.com](http://OneTouch.com) o llamando al 1 866 693-0599.