

ONETOUCH Reveal®



Aplicación web OneTouch Reveal®


Lo ayuda a entender mejor sus resultados

- Hace un seguimiento de sus datos de glucosa en la sangre, alimentos, dosis de insulina y actividad a lo largo del tiempo.
- Sugiere consejos personalizados para ayudarlo a mantenerse enfocado y dentro del rango*.
- Los informes pueden imprimirse y dejarse listos para analizarse en su próxima cita con su profesional de la salud.
- Puede utilizarse en computadoras PC o Mac en OneTouchReveal.com.

* Asegúrese de hablar con su profesional de la salud acerca de las acciones que son correctas para usted.

Cómo configurar la aplicación web de OneTouch Reveal®

Antes de comenzar, confirme que las cookies estén habilitadas en su explorador.

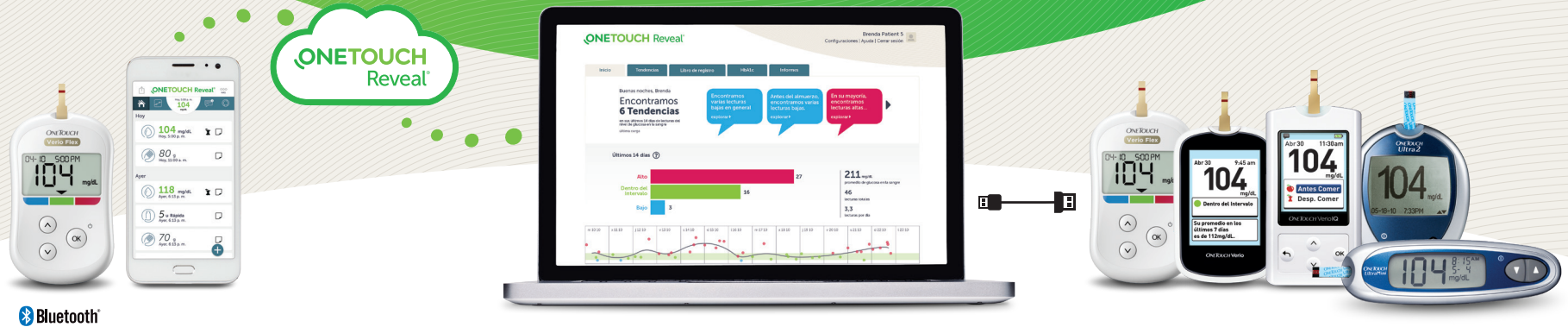

Opción inalámbrica

1. Conecte los dispositivos inalámbricos y active su cuenta

- Instale la aplicación móvil OneTouch Reveal® en su dispositivo móvil.
- Abra la aplicación móvil y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar su cuenta y emparejar su medidor OneTouch Verio Flex®.
- Revise la bandeja de entrada de su correo electrónico para encontrar el enlace que le permite confirmar su dirección de correo electrónico.

Para obtener más información, consulte el **archivo de ayuda de la aplicación móvil OneTouch Reveal®**.

2. Inicie sesión en la aplicación web de OneTouch Reveal® en su computadora

- Visite **OneTouchReveal.com** e ingrese el mismo **Nombre de usuario** y **Contraseña** que usó en la aplicación móvil de OneTouch Reveal®.
- Haga clic en **Iniciar sesión** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Opción con cable

1. Registre y active su cuenta

- Visite **OneTouchReveal.com**, haga clic en **Crear una cuenta** y siga las indicaciones.
- Revise la bandeja de entrada de su correo electrónico para encontrar el enlace que le permite confirmar su dirección de correo electrónico.

2. Instale la Herramienta de transferencia de datos

- Desenchufe todos los cables USB de OneTouch® de su computadora.
- **Inicie sesión** en su cuenta de OneTouch Reveal® y haga clic en **Ayuda** en la parte superior derecha de cualquier pantalla.
- Haga clic en el botón **Descargar** en la **Herramienta de transferencia de datos** y siga las indicaciones.
- Seleccione los dispositivos que correspondan.
- Haga clic en **Finalizar**. Después de la instalación, es posible que se le indique que reinicie la computadora.

3. Transfiera los datos de su medidor OneTouch®

- Conecte su medidor a la computadora con el cable USB de OneTouch® (el cable se vende por separado).
- Abra la Herramienta de transferencia de datos de OneTouch Reveal® y seleccione **Detectar ahora**. Cuando se encuentra el dispositivo, aparece una pantalla de confirmación.
- **Inicie sesión** en la aplicación web OneTouch Reveal®.
- Haga clic en **Confirmar** para transferir los datos. Cuando la transferencia se complete, haga clic en **OK**.



¡La configuración está lista! Ahora puede acceder a sus datos con la aplicación web OneTouch Reveal® en **OneTouchReveal.com**

ONETOUCH®
cada toque es un paso hacia adelante®



Vea sus lecturas de glucosa en la sangre


- Haga clic en la pestaña **Libro de registro** para ver sus lecturas de glucosa en la sangre.
- Haga clic en la pestaña **Tendencias** para ver un resumen de 14 días.



Prepárese para su próxima visita con su profesional de la salud

- Haga clic en **¿Visitará a su médico?** Aparecerá la pantalla **Prepárese para su visita**.
- Haga clic en **Descargar informes**. Para incluir los informes, asegúrese de hacer clic en la casilla al lado de **Incluir informes para su médico** antes de hacer clic en **Descargar informes**.

Si quiere cambiar la lista de los informes que desea imprimir para su visita, haga clic en **Configuraciones**, luego en **Informes preferidos a imprimir** y, finalmente, seleccione los informes que necesita.

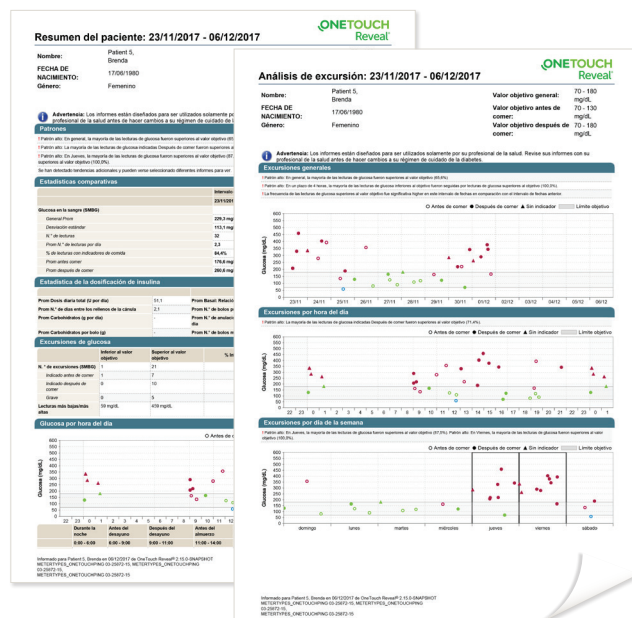

¿Tiene preguntas?
Estamos aquí para ayudarlo.



Visite [OneTouch.com](https://www.onetouch.com).



Llámenos al 1 866 693-0599.

Encuentre los requisitos necesarios del sistema
en [OneTouchReveal.com/support/es_US/](https://www.onetouch.com/support/es_US/).



ONETOUCH[®]
cada toque es un paso hacia delante[®]